



**APARATOS**

**CIENTIFICOS**

**Instrucciones de Manejo para el  
Lector de Micro-Hematocrito  
Modelo L-10**

---

*INSTRUCCIONES DE MANEJO PARA EL  
LECTOR DE MICRO-HEMATOCRITO  
MODELO L-10*

1.— Después de centrifugar la sangre, colocar el capilar en la ranura de plástico, orientando el paquete de eritrocitos hacia el punto rojo.

---

2.— Hacer coincidir exactamente la fase eritrocitos plasma con la raya negra, no mover más el capilar.

---

3.— Moviendo el disco de plástico, hacer coincidir las líneas grabadas, con el fondo del paquete de eritrocitos por un lado, y por el otro, con la fase plasma-aire, procurando que las líneas intercepten esos puntos por el centro.

---

4.— Hacer la lectura hematocrito en la escala.

---